

## ISTRUZIONI D'USO e DI MANUTENZIONE

Tale dispositivo è stato realizzato a regola d'arte e rispettando le regole di conformità alla Dir. CEE 42/93 e al Decreto Lgs. n.° 46/97. Per consentire un utilizzo sicuro del suddetto dispositivo, La preghiamo di leggere attentamente le seguenti informazioni con l'espresso invito ad attenersi agli indirizzi consigliati.

### Destinazione d'uso

Il tutore è stato realizzato per un utilizzo esclusivo da parte della S.V. e come tale è considerato a tutti gli effetti un dispositivo su misura. Il tutore ha la funzione di sostenere la S.V. e di consentirne e/o agevolarne la deambulazione.

### Indicazioni d'uso

Il tutore è progettato e realizzato con riferimento alle specifiche esigenze funzionali del paziente e presuppone un utilizzo per una normale attività di relazione o lavorative o di tempo libero. È consentita una utilizzazione per una moderata attività sportiva, comunque non di tipo agonistico. Qualsiasi utilizzo non appropriato può pregiudicare le condizioni di sicurezza del tutore.

### Effetti collaterali

La tecnica costruttiva ed i materiali impiegati escludono, in linea di principio, l'insorgenza di effetti collaterali non previsti e non desiderati quali allergie e/o difetti di circolo. In tal caso è bene informare il medico di fiducia per gli interventi adeguati al caso.

### Consigli d'uso

Il tutore va indossato con delicatezza in una posizione seduta assicurandosi, inoltre, che segua la conformazione anatomica dell'arto. Prima di procedere alla deambulazione è bene accertarsi che le cinghie di chiusura assicurino un bloccaggio totale del tutore all'arto e **che le ventuali articolazioni siano ben funzionanti.**

Durante la deambulazione è consigliabile:

- non effettuare passi troppo lunghi;
- effettuare un movimento sincrono degli arti inferiori.

Nell'uso è preferibile indossare una calzamaglia soprattutto in presenza di ferite.

E' consigliabile togliere il tutore prima di mettersi a letto (salvo diversa indicazioni medica).

Dopo la verifica del medico prescrittore è da ritenere che il tutore sia funzionalmente idoneo ed appropriato alle Sue esigenze.

### **ATTENZIONE !**

Se durante l'utilizzo si dovessero riscontrare problemi sostanziali riguardante il funzionamento del tutore, si prega di rivolgersi al fabbricante per le valutazioni degli interventi necessari.

In caso di uso combinato con altri dispositivi applicabili all'arto in grado di modificare l'asse dello stesso (es. calzatura ortopedica, plantare, rialzo), consultare il medico prescrittore o il tecnico ortopedico per una verifica di funzionalità.

Una deambulazione irregolare, molto sollecita o saltellante o anche semplicemente di lunga durata può provocare indolenzimenti e/o piaghe da iperpressioni sull'arto.

Non usare mai il tutore senza la calzatura.

Temperature superficiali superiori ai 120 °C possono comportare gravi deformazioni strutturali del tutore. Evitare un'esposizione prolungata a sorgenti di calore ad elevata intensità.

La combustione della struttura (oltre i 300 °C) del tutore provoca l'emissione di gas pericolosi quali monossido e biossido di carbonio. Evitare il contatto prolungato con sorgenti di calore ad elevata intensità. Per lo spegnimento utilizzare acqua nebulizzata e/o schiuma.

### Manutenzione

La manutenzione del tutore riguarda essenzialmente due aspetti:

#### *Igiene e pulizia*

Allo scopo di evitare l'insorgere di possibili irritazioni cutanee, infezioni o altro è bene procedere con frequenza almeno bisettimanale ad un'adeguata pulizia del dispositivo con una pezzuola di cotone imbevuta di acqua e di soluzione saponosa neutra, asciugando con una passata di un panno asciutto.

#### *Efficienza strutturale e meccanica*

Almeno una volta ogni 4 mesi è bene che la S.V. si rechi dal fabbricante per l'ispezione del tutore, la verifica dell'integrità dei suoi componenti.

**Precauzioni d'uso e/o avvertenze importanti**

Il tutore è progettato per un carico di circa \_\_\_ kg in condizioni di assoluta sicurezza.

Evitare, quindi, di sollevare carichi eccessivi. Nel caso di un consistente aumento del proprio peso corporeo è bene segnalarlo subito al fabbricante per la valutazione della sicurezza del tutore.

Evitare di conservare o riporre il tutore in ambienti umidi o salini.

In caso di urti accidentali rilevanti ovvero di un improvviso deterioramento delle prestazioni, il tutore non deve essere utilizzato senza la preventiva verifica da parte del fabbricante dei pericoli connessi alle eventuali anomalie riscontrabili.

Il primo utilizzo della protesi deve avvenire entro 3 giorni dalla consegna (in assenza di indicazioni specifiche nel piano terapeutico) per non indurre la compromissione delle prestazioni previste a seguito di evoluzioni somatiche.

Il non utilizzo del tutore per un periodo ininterrotto di oltre sei mesi, può pregiudicare le prestazioni previste e pertanto è necessario far verificare in tal caso la funzionalità del tutore da parte del fabbricante.

Prestare molta attenzione nell'attraversamento di porte a chiusura automatica, poiché l'eventuale intrappolamento del tutore può provocare conseguenze di notevole rischio.

La riduzione significativa della circonferenza dell'arto va segnalata immediatamente al fabbricante perché potrebbe impedire la ritenuta del tutore.

Qualsiasi manifestazione patologica a carico dell'arto (edemi, irritazioni, problemi di circolo, dolori ecc.) deve essere subito segnalata al medico di fiducia. Vanno altresì segnalati al medico problemi o dolori dell'apparato scheletrico o muscolare che possano aver rapporto di concausa con l'utilizzo del tutore.

**Garanzia**

Il fabbricante assume a suo carico la garanzia di perfetta funzionalità per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna.

La garanzia è valida sempre che il dispositivo venga utilizzato sulla base di quanto indicato nelle istruzioni d'uso e salvo i seguenti casi:

modifiche somatiche significative dell'utilizzatore;

cause di forza maggiore;

urti o cadute accidentali;

manomissione da parte di chiunque terzo, compreso l'utilizzatore, giudicate compromissive della sicurezza del dispositivo.

| <b><u>Manutenzione Ordinaria Programmata</u></b> | <b><u>Data Esecuzione</u></b> | <b><u>Annotazioni</u></b> |
|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1° Controllo entro il                            |                               |                           |
| 2° Controllo entro il                            |                               |                           |
| 3° Controllo entro il                            |                               |                           |